

VivaDiag™



SOLO PER USO PROFESSIONALE
NON UTILIZZARE PER AUTO ANALISI

Test Rapido Antigene SARS-CoV-2

Il test rapido Antigene VivaDiag™ SARS-CoV-2 è un test rapido per la rilevazione qualitativa dell'antigene proteico nucleocapside da SARS-CoV-2 in campioni prelevati con tampone nasale e faringeo umano. Il test è solo per uso diagnostico in vitro.



Caratteristiche tecniche

Nome del prodotto	VivaDiag™ SARS-CoV-2 test rapido Antigene
Principio del test	Oro colloidale
Tipo di campione	Tampone nasale o faringeo
Volume del campione	60 µL
Durata del test	15 minuti
Temperatura di operatività	15-30°C
Temperatura di conservazione	2-30°C
Scadenza (a confezione integra)	24 mesi


CE

 **ALPHA PHARMA**
Life Science Company




Fasi di esecuzione del test

-- Raccolta dei campioni

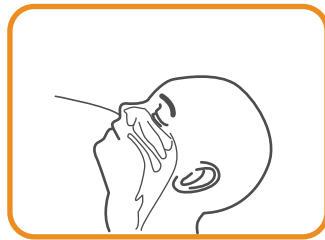


Tampone nasale

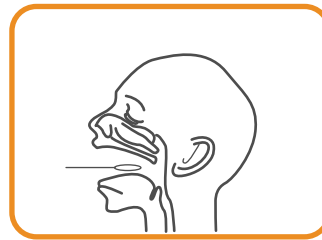


Tampone faringeo


-- Preparazione della soluzione

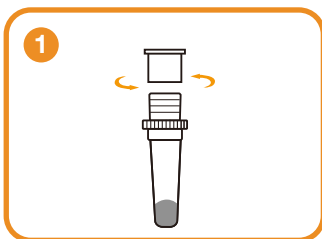

1. Rimuovere con cautela il tappo

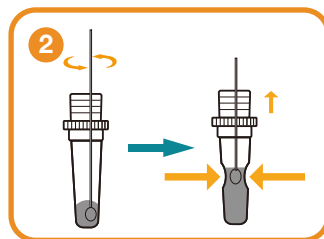


2. Rilasciare il campione all'interno della provetta

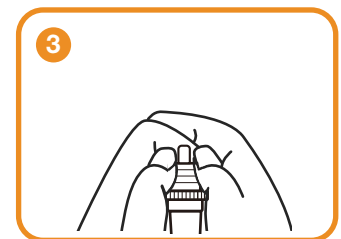


3. Riposizionare il tappo



-- Rilevamento

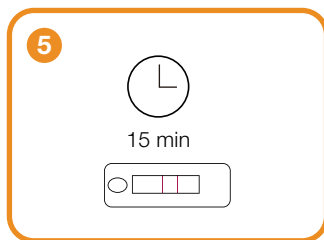

5. Leggere il risultato

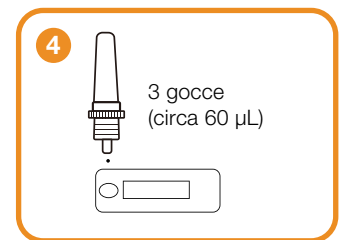

4. Applicare il campione estratto




-- Interpretazione del risultato



Positivo



Negativo

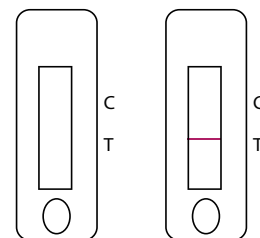

Non Valido

Nota: il test rapido VivaDiag™ SARS-CoV-2 Ag è stato progettato SOLO per fungere da test di supporto per casi sospetti di rilevamento negativo degli acidi nucleici del coronavirus o in combinazione con il rilevamento degli acidi nucleici nella diagnosi di casi sospetti.

I risultati del test dell'antigene della proteina nucleocapside non devono essere utilizzati come soluzione unica per diagnosticare o escludere l'infezione da SARS-CoV-2 (COVID-19) o per informare sullo stato dell'infezione.